



Masque de protection KN95 non-médical

Nom du produit: Masque de protection KN95 non-médical

Norme executive: GB2626-2006

Structure, performance et composition du produit: Le produit est fait à partir de trois couches no-tissées, obtenues par extrusion-soufflage (meltblown), barette nasale, bandes élastiques auriculaires.

Domaine d'utilisation

Le masque est utilisé pour couvrir la bouche, le nez et le menton, pour empêcher/ bloquer les gouttelettes et les polluants émis par la bouche et le nez du porteur, dans un environnement ordinaire non-médical.

Date de production: Voir le certificat.

Fabricant: Hunan Langdun Technology Company Limited

Adresse de fabricant: Chengbei road, Shuangpai Country, Yongzhou city, Hunan Province.

Hotline, service après-vente: 0746-7990598

Mode d'emploi:

- Ouvrir le paquet et placer le masque ouvert dans le creux de votre main.
- Placer le côté supérieur pointu du masque, la face intérieure, sur le visage
- Couvrir le nez et la bouche et fixer les boucles élastiques autour de vos oreilles.
- Ajuster la barette nasale et vérifier que le masque est bien ajusté à votre visage.

Instructions:

- Ouvrir le paquet après vérifier la période de validité et que le paquet est en bonne condition.
- Couvrir la bouche et le nez, ajuster la barette du nez et fixer les bandes élastiques auriculaires.

- Eliminer/jeter les masques usagés dans un contenant prévu à cette fin pour prévenir la contamination de l'environnement.

Contre- indication: Aucune

Conditions et méthode de stockage:

Stocker dans un endroit bien ventilé, à une température relative ne dépassant pas 40°C et un taux d'humidité qui ne dépasse pas 80%, gaz non-corrosifs.

Durée de vie est d'un an si le produit est entreposé selon les conditions prévues par le fabricant.

Boîte de 50 pièces